

ИНДИКАТОРНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ

в пеналах, по 100, 50, 25 шт. для визуального экспресс-контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств:

☑ Мироксид 2000

☑ Миродез базик

☑ Альфадез

☑ Миродез пур

☑ Альфадез окси

☑ Миродез универ

☑ Альфадез орто

☑ Миродез специаль

☑ Альфадез форте

☑ Мирацид

☑ ДХЦ

☑ Хорт

☑ Хлормисепт-Р

☑ Хорт лайт

☑ Энзимодез

☑ Хорт таблетки

☑ Экобриз окси

☑ Изумруд

☑ Экобриз окси лайт

☑ Хлормисепт люкс

☑ Экобриз

☑ Хорт денталь


☑ Экобриз концентрат

☑ Хорт стома




Порядок проведения анализа рабочих растворов дезинфицирующих средств

В мензурку или мерный стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного рабочего раствора дезинфицирующего средства

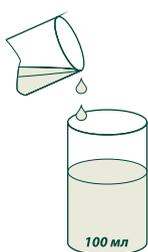


1. Погружение тест-полоски в анализируемый раствор

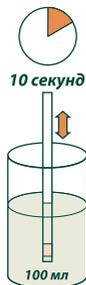

2. Удаление избытков анализируемого раствора с индикаторной тест-полоски



3. Выдержка индикаторной полоски на фильтровальной бумаге

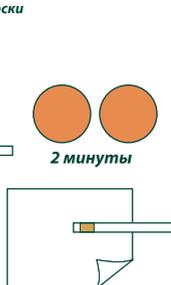

4. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветами шкалы сравнения



Сводная таблица контроля дезинфицирующих средств

Период контроля	Количество исследований	Количество неудовлетворительных результатов, абс.	Количество неудовлетворительных результатов, %
январь			
февраль			
март			
I – КВАРТАЛ			
апрель			
май			
июнь			
II – КВАРТАЛ			
I – ПОЛУГОДИЕ			
июль			
август			
сентябрь			
III – КВАРТАЛ			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			
IV – КВАРТАЛ			
ВСЕГО ЗА ГОД			

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляемым медицинскую деятельность»

II. Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

1. Общие положения

1.2. Для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий ООМД должны регулярно обеспечиваться моющими и дезинфицирующими средствами различного назначения, кожными антисептиками, средствами для стерилизации изделий медицинского назначения, а также стерилизационными упаковочными материалами и средствами контроля (в том числе химическими индикаторами).

3. Обеспечение проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий

3.1. В целях защиты пациентов и персонала от внутрибольничной инфекции организуется и проводится производственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных правил в лечебно-профилактических организациях при проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, работ и услуг.

3.2. Производственный контроль включает:

- наличие в организации официально изданных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- назначение лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля;
- организацию лабораторно-инструментальных исследований;
- контроль наличия в организации документов, подтверждающих безопасность и безвредность продукции, работ и услуг;
- визуальный контроль уполномоченными должностными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

ООО «МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ» —
 отечественный разработчик,
 производитель и поставщик
 современных дезинфекционных
 средств.

МИР
MD
 ДЕЗИНФЕКЦИИ



Мироксид®-2000
 (базовый раствор+активатор)
 ДВ: НУК.
 ДВУ эндоскопов и стерилизация ИМН



Миродез® универ
 ДВ: ЧАС, глиоксаль.
 Дезинфекция, +ПСО, ИМН, биологических выделений; дезинфекция и мытьё поверхностей, посуды, белья.



Энзимодез®
 ДВ: ЧАС, ПГМГ, липаза, амилаза, протеаза.
 Идеальная дезинфекция и очистка ИМН, удаление биоплёнок.



Миродез® специаль
 Мощнее-чистящее средство с дезинфицирующим действием для текущей уборки отделений акушерского стационара; дезинфекция и мытьё молочной посуды удаление биоплёнок.



Экобриз® окси
 ДВ: перекись водорода, ПГМГ.
 Дезинфекция, +ПСО, ИМН (включая наконечники для бормашин и турбин); кувезов; поверхностей и др.



Экобриз® спрей, салфетки Экобриз®
 ДВ: ЧАС, изопропанол.
 Быстрая дезинфекция за 30 сек. Труднодоступных поверхностей; оборудования; резиновых перчаток.



Экобриз® окси лайт
 ДВ: перекись водорода, комплекс ЧАС.
 Дезинфекция, +ПСО, ИМН; наркозно-дыхательной аппаратуры; кувезов; пищевых яиц и др.



Миродез® спрей, салфетки Миродез®
 ДВ: комплекс ЧАС. неионогенные ПАВ.
 Бесспиртовое средство для экспресс дезинфекции датчиков УЗИ.



Экобриз® концентрат
 ДВ: ЧАС, амины.
 Дезинфекция, +ПСО, ИМН; посуды (обезжиривание); оттисков; наркозно-дыхательной аппаратуры.



Миродез® muss
 ДВ: ЧАС, ПГМГ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.
 Гигиена рук, обработка операционного и инъекционного полей.



Мирацид
 ДВ: комплекс ЧАС, органические кислоты, ПГМБ.
 Дезинфекция, +ПСО, ИМН; биологических выделений; поверхностей, посуды, акриловых ванн, дезинвазия.



Миросептик, Миросептик экспресс, Миросептик экспресс-ОП, Экобриз® антисептик, Экобриз® антисептический гель, Миросептик экспресс салфетки
 Спиртовые кожные антисептики. Гигиена рук, обработка операционного и инъекционного полей.



Миродез® базик
 ДВ: ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов;
 Дезинфекция, +ПСО, ИМН; биологических выделений; поверхностей, посуды, белья.



Экобриз® антисептик-ОПК
 ДВ: изопропанол, ЧАС, красители.
 Обработка операционного и инъекционного полей.



Миродез® пур
 ДВ: ЧАС, ПГМГ;
 Дезинфекция и мытьё поверхностей, посуды, белья, сан-тех. оборудования; борьба с плесенью.



АКВАБРИЗ®
 Хлорсодержащие таблетки для обеззараживания воды.

ООО «ПОЛИСЕПТ» —
отечественный разработчик,
производитель и поставщик
современных дезинфекционных
средств.

ПОЛИСЕПТ
Всё для дезинфекции



ХОРТ таблетки

ДВ: ПГМГ, ЧАС.
Дезинфекция, +ПСО, ИМН;
кувезов, поверхностей,
пищевых яиц.



ХОРТ денталь

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМБ, синергисты
бицидидов.
Дезинфекция, +ПСО, ИМН.



Альфадез®

ДВ: ЧАС, ПГМГ.
Дезинфекция, +ПСО, ИМН;
кувезов; поверхностей; систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.



Дезолвер гель

ДВ: ПГМГ
Предварительная обработка
(консервация) ИМН
для обеспечения микробиологической
безопасности.



ХОРТ

ДВ: комплекс ЧАС, амины, ПГМБ.
Дезинфекция, +ПСО, ИМН;
кувезов, поверхностей; воздуха;
дезинвазия.



Энзимосепт®

Ферментативное моющее средство
для очистки ИМН
(в т.ч. эндоскопов) ручным
и механическим способами.



ХОРТ лайт

ДВ: комплекс ЧАС.
Дезинфекция, +ПСО, ИМН;
кувезов, поверхностей, посуды
(обезжиривание);
пищевых яиц.



Хлормисепт®-Р

Хлорсодержащие таблетки и гранулы.

Хлормисепт® Люкс

Хлорсодержащие таблетки
с мощным эффектом.



Альфадез® форте

ДВ: глутаровый альдегид;
глиоксаль, комплекс ЧАС.
ДВУ эндоскопов и стерилизация
ИМН, дезинфекция поверхностей.



Дезолвер клин

Кислородсодержащий порошок
Дезинфекция, стирка и отбеливание
текстильных изделий.



Альфадез® орто

ДВ: ортофталевый альдегид;
комплекс ЧАС.
ДВУ эндоскопов и стерилизация
ИМН.



Чистота, Чистота антисептик, Чистота эбзи

Жидкое мыло-антисептик
с антибактериальным эффектом



Альфадез® окси

ДВ: перекись водорода; НУК.
ДВУ эндоскопов и стерилизация
ИМН.



Гаммасепт

Жидкое крем-мыло для санитарной
обработки кожных покровов
и профилактики пролежней.



ХОРТ стома

ДВ: амины, ЧАС, ПГМБ.
Дезинфекция+очистка
отсасывающих систем.



Каппадерм

(крем питательный для рук)

Дзетадерм

(крем защитный для рук)